

advanced

Cremer

- livre de gelatina
- possui alta absorção
- permite a respiração da pele
- protege contra as bactérias



curativo hidrocoloide estéril

Composição: curativo autoadesivo que consiste em uma película semipermeável de poliuretano e polímero de carboximetilcelulose (CMC).

Princípio de funcionamento/Mecanismo de ação: Forma um gel após absorver o exsudato da ferida, proporcionando um ambiente úmido no leito da lesão, ideal para a granulação e a epiteliação. A formação do gel evita que o curativo se fixe na ferida, podendo ser removido sem dor e sem danificar o tecido de granulação e o de epiteliação.

Indicação de uso: Tratamento de feridas não infectadas, com exsudação leve a moderada, queimaduras de segundo grau, úlceras por pressão, tratamento lento de feridas crônicas e abrasões.

Instruções de uso:

PREPARO PARA APLICAÇÃO

- Limpar e irrigar bem o leito da lesão. Se necessário, realizar o desbridamento da ferida;
- Limpar e secar cuidadosamente a pele adjacente à ferida;
- Escolher um curativo que ultrapasse em aproximadamente 3cm a borda da ferida.

APLICAÇÃO



- Abra cuidadosamente a embalagem estéril;
- Remova a película de proteção;
- Aplique o Curativo Hidrocoloide Cremer Advanced no leito da ferida evitando tocar na face adesiva.

REMOÇÃO/TROCA

Cuidadosamente pressione a pele e vá levantando as bordas do curativo. Quando todos os lados estiverem livres, retire o curativo. Se a cicatrização não evoluiu, consulte um profissional da saúde.

TEMPO DE USO

O Curativo Hidrocoloide Cremer Advanced pode permanecer aplicado por até 7 dias, desde que não haja saturação do hidrocoloide, descolamento das bordas ou sinais de infecção e aumento do grau de exsudação da ferida.

Contraindicações: Não aplique o produto sobre feridas infectadas ou contaminadas, não aplique o produto sobre queimaduras de terceiro grau. Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

Precauções: Este produto deve ter a prescrição e supervisão de um profissional da saúde. Não utilize o produto se a embalagem estiver violada. Para uso externo somente.

Advertências: Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Produto de uso único. Destruir após o uso.

Condições de armazenamento:

Manter em local seco e fresco. Manter ao abrigo do sol.

Esterilizado a radiação gama.

Validade: 24 meses a partir da data de esterilização.

CREMER S.A.

Rua Ewaldo Jansen, 777
Blumenau - SC - CEP 89032-085
Indústria Brasileira
CNPJ nº 82.641.325/0013-51
Registro Anvisa nº 80245210090
Resp. Técnico: Christine D. Safons
CRF/11 - SC - nº 8231

FALE com a Cremer

	Atendimento ao Consumidor 0800 727 55 22
	Call Center 0800 701 30 80
	www.cremer.com.br falecom@cremer.com.br